

# RESALIVA odběrová souprava


## Návod k použití



**1** Před samotným odběrem **30 min.** **nejezte, nepijte, nekuřte, nevyplachujte si ústa.**




**2** Umyjte nebo dezinfikujte si ruce.

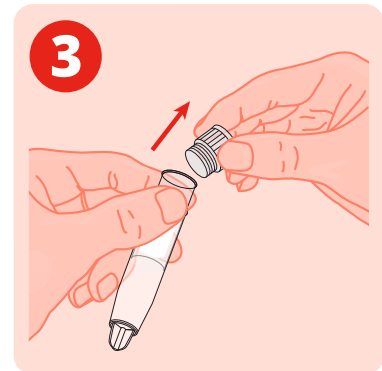

**3** Opatrně otevřete zkumavku s tyčinkou na sliny.



**4** Tyčinku vložte do úst.

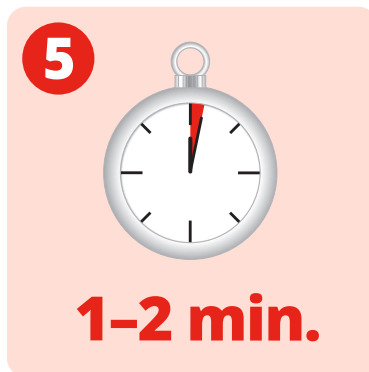

**5** **1-2 min.**

Tyčinku nechte v ústech **1-2 min.** bez žvýkání.




**6** Tyčinku ústy vložte do zkumavky.



**7** Zkumavku pořádně zavřete.



**8** Na zkumavku nalepte přiložený čárový kód, tak aby byl pouze na dolní části odběrové zkumavky.

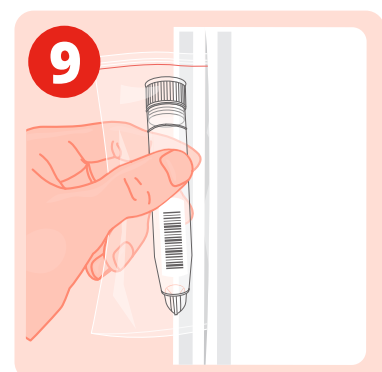

**9** Zkumavku vložte v igelitovém sáčku do obálky a odešlete do laboratoře.

Katalogové číslo GS-316 Odběrová zkumavka na sliny | [orders@genespector.com](mailto:orders@genespector.com)