


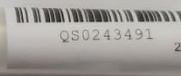
- 4) Tabulku uložte pod názvem: **Název školy-třída.xlsx** a zašlete na email:
ivana.sousedova@spadia.cz
 - Pokud budete mít 5 skupin = 5 tabulek
 - Nejpozději v den testování ráno

- 5) Samotné testování je velmi jednoduché – viz. **Manual_CZ_Resaliva** nebo přiložené video [zde](#).
 - Manuál i video může sdílet na školních stránkách nebo poslat rodičům.

- 6) Jedná se o jednoduchý odběr vzorku ze slin, kde ve zkumavce je umístěný vatový tampón, který se vloží do úst a 1-2minuty se ponechá v ústech, aby dostatečně nasákl slinami. Pak se vrátí zpět do zkumavky.
 - Zkumavka se skládá z více částí, ale pouze se otevře vrchní víčko, kde je tampón a znova pak zavře. Vatový tampón musí zůstat ve střední části zkumavky.




- 7) Zkumavku označte čárkovým kódem a druhý kód ze dvojice nalepte do tabulky ke jménu.
 - Kód na zkumavce nesmí přesahovat přes víčko a měl by být dobře nalepený, aby se neodlepoval.

Příjmení	Jméno	ČísloPojistence	DatumNarozeni	Štítek vzorek	Štítek laboratoř
Testovací	Michal	1212121212	28.08.1979	 QS0243491 2021	
				 QS0243491 2021	

- Kódy jsou na archu A4 vždy ve dvojicích vedle sebe



- 8) Všechny vzorky z každé skupiny stáhněte gumičkou vložte zvlášť do sáčku nebo obálky a přiložte vytištěný seznam s nalepenými kódy.
 - Na sáček/obálku napište název školy a třídy nebo libovolně označte, aby bylo jasné, že jsou tam vzorky

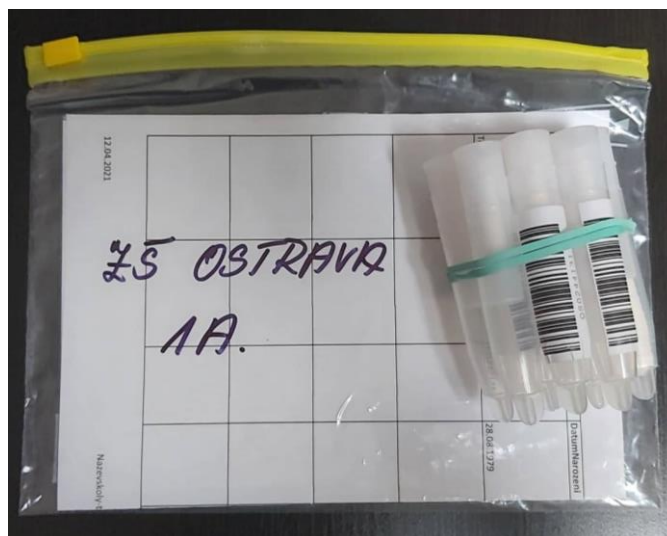

- 9) Všechny sáčky/obálky předejte řidiči, který vzorky doručí do laboratoře.
- 10) **Výsledky** vyšetření zašleme elektronicky nejpozději do 24 hodin od doručení vzorku do laboratoře.
 - Každý žák dostane informaci sms na uvedené telefonní číslo.
 - Na Váš email Vám zašleme přehled výsledků celé školy druhý den ráno.
 - Dostanete i přístup do webové aplikace Virtuallab, kde uvidíte taky všechny výsledky. (přihlašovací údaje zašleme zvlášť i s odkazem a manuálem pro přihlášení).